


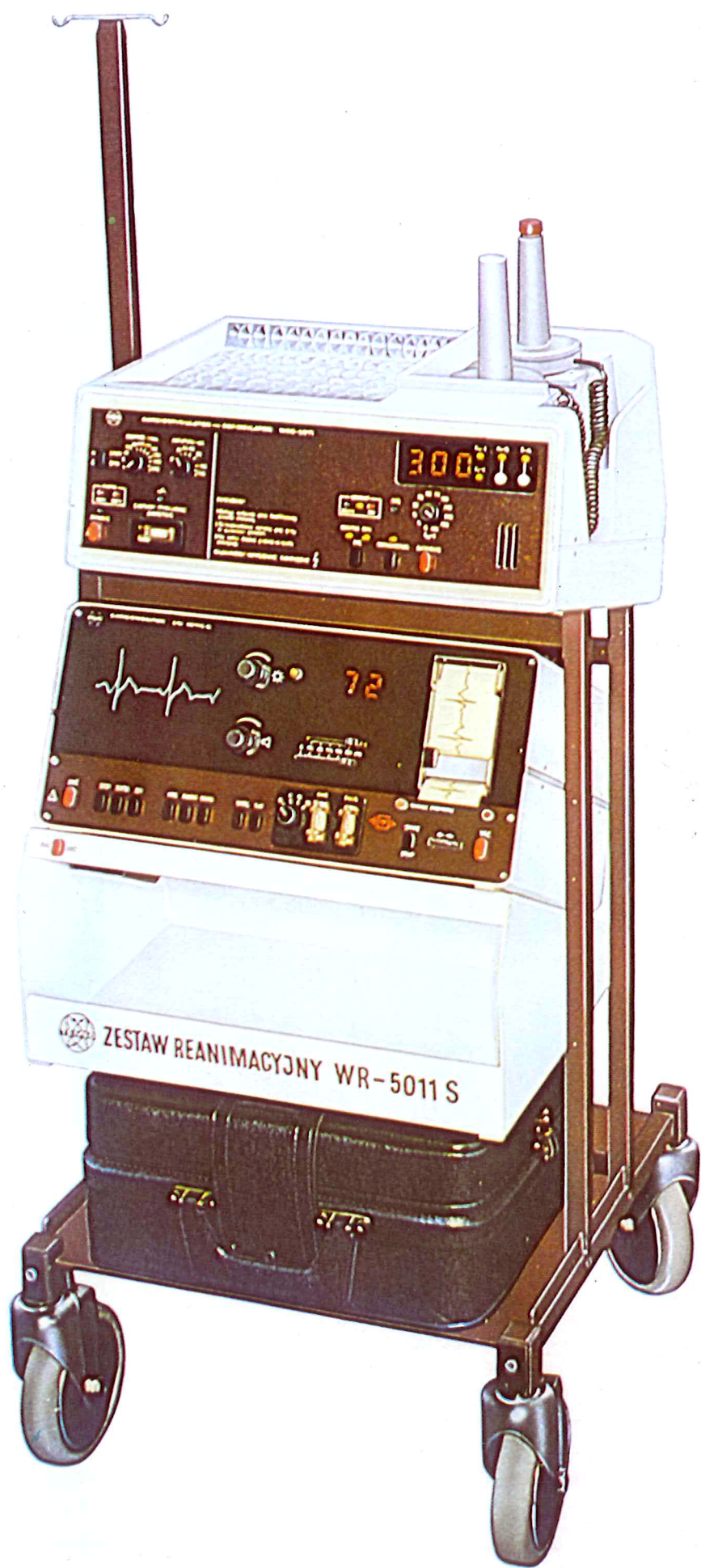

РЕАНИМАЦИОННЫЙ НАБОР ВР-5011 С

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Реанимационный набор ВР-5011С является современным устройством, дающим возможность осуществления: дефибрилляции, кардиоверсии, наружной стимуляции, а также наблюдения пациента после проведения реанимационной процедуры.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реанимационный набор ВР-5011С содержит: дефибриллятор постоянного тока, наружный стимулятор, кардиомонитор и регистратор ЭКГ. Энергию дефибрилляции можно устанавливать до значения 360 Дж (для сопротивления пациента 50 ом), для 11 позиции скачкообразной регуляции. Дефибриллятор имеет световую сигнализацию правильного контакта с телом пациента. Кардиомонитор изображает кривую ЭКГ с дефибрилляционных или стандартных электродов. Позволяет он также наблюдать кривую ЭКГ во время наружной стимуляции. Все наблюдаемые сигналы можно регистрировать на ленте регистратора. Кардиомонитор изображает также частоту сердцебиения и оснащён в систему предельных частот. Микропроцессорная система, сотрудничающая с цифровыми индикаторами, вычисляет и изображает значения: накопленной энергии, энергии фактически полученной пациентом (после дефибрилляции), а также сопротивления пациента и тока, проплывающего через него.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ДЕФИБРИЛЛЯТОР


Форма импульса	— синусоида, критически гашенная или биполярный импульс
Доставляемая энергия, Дж	— 5, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 300, 360
Время зарядки, с	— макс. 10
Сигнализация полной зарядки	— звуковая и цифровой индикатор
Сигнализация правильности контакта дефибрилляционных электродов	— три люминисцентные диоды
Синхронизация	— зубцом R с запазданием 20 мс

СТИМУЛЯТОР

Форма импульса	— прямоугольный, биполярный = 30 мс
Диапазон частот, имп/мин	— 40—240
Диапазон амплитуды импульса стимулирующего, мА	— 0—150

МОНИТОР

Входы	— ЭКГ со стандартных электродов (отведения I, II, III) или дефибрилляционных электродов
Входное сопротивление, Мом	— пупьса с плетизмографического датчика
СММР, дБ	≥ 2 x 2
Частотная полоса, Гц	≥ 100
Диапазон измерения значения и установки тревог, уд/мин	— 0,01—40 для стандартных электродов
Скорость развёртки и ленты регистратора, мм/с	— 0,5—30 для дефибрилляционных электродов
Питание, В	— 20—240
Гц	— 25, 50
класс	— 220
тип	— 50
Размеры, мм	— II
Масса, кг	— CF
	— 490 x 590 x 1100
	— около 55

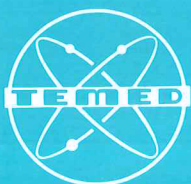

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

ZAKŁADY
ELEKTRONICZNEJ
APARATURY MEDYCZNEJ

ul. Wolności 345a
41-800 Zabrze

ПОЛЬША

Телефон: 716421
Телекс: 036420



ЭКСПОРТЕР:

VARIMEX

ul. Wilcza 51/52
00-679 Warszawa

ПОЛЬША

Телефон: 288481
Телекс: 814311